

# Tre passaggi per cominciare ad utilizzare **MiSight® 1 day**



## Passaggio 1: Certificazione

### Come completare la certificazione:

- 1: Iscriviti alla piattaforma Learning Academy di Coopervision.
- 2: Ricorda di inserire correttamente il tuo codice cliente (es. 1000123456) per poter essere ricontattato.
- 3: Completa il CORSO DI CERTIFICAZIONE: <https://elearning.coopervision.it/it/training/misight-1-day-nuovo-corso-di-certificazione/overview>

**LEARNING  
ACADEMY**  
<https://elearning.coopervision.it/>



## Passaggio 2: Attivazione

Contatta il tuo agente di zona per conoscere le condizioni commerciali di attivazione al prodotto.

### MATERIALI DISPONIBILI


All'interno del corso di certificazione potrai scaricare il CERTIFICATO di completamento e gli ARTICOLI CLINICI di riferimento.

## Passaggio 3: Azione

Parla con le famiglie e con i tuoi oculisti di riferimento delle lenti a contatto per la gestione della miopia.

### 3 IDEE PER COMINCIARE

- Sugeriamo di cominciare l'applicazione di MiSight in età compresa tra 8 e 16 anni.
- Consigliamo di identificare ragazzi che già portano le lenti a contatto. All'inizio potrebbe essere più semplice invitarli a provare MiSight.
- Puoi pensare anche a ragazzi che vorrebbero le lenti per attività ludiche o sportive.

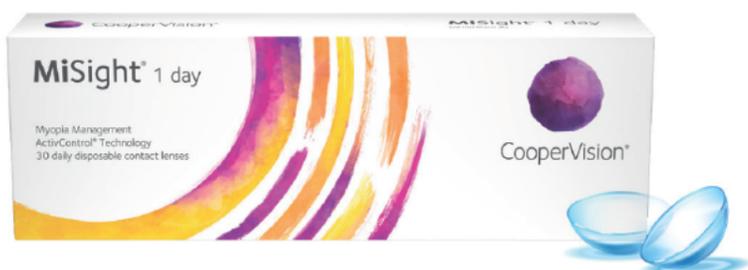

Come vede il bambino miope?  
Nel sito: [www.coopervision.it/misight](http://www.coopervision.it/misight) puoi trovare altri contenuti che potrebbero aiutarti a spiegare la miopia alla famiglia come, ad esempio, il VISION SIMULATOR.



# Guida alla selezione delle prime lenti



## Passaggio 1: Aggiorna la prescrizione

Verifica la refrazione più aggiornata nell'occhialino di prova e registra l'AV ottimale usando la tecnica di bilanciamento binoculare.

Valuta l'equivalente sferico se necessario (si suggerisce applicazione su ast  $\approx 0,75$  D)

### TOP TIP: Tecnica di bilanciamento binoculare consigliata:

Utilizzare +0.75D oppure +1.00D per annebbiare un occhio mentre si valuta l'altro. Puntare alla massima qualità visiva

## Passaggio 2: Seleziona e valuta MiSight® 1 day

Seleziona la lente MiSight® 1 day che corrisponde alla prescrizione più aggiornata. Valuta la distanza apice corneale-lente.

Lascia che le lenti si adattino per almeno 5 minuti e registra il miglior Visus di MiSight effettuando, se necessario, una sovrarefrazione.

Valuta il movimento della lente in sito.

### TOP TIP:

Immagini fantasma e aloni sono inizialmente possibili. Si tratta di effetti visivi associati al trattamento e svaniscono in seguito ad un periodo di adattamento alla lente.

## Passaggio 3: Pianifica gli incontri successivi

Il primo sarà ad una settimana per confermare il potere delle lenti e la qualità della visione.

Valuta la manipolazione e programma controlli di follow-up regolari nel tempo.

**TOP TIP: Aumentare** il negativo di uno step di 0.25D solo se migliora significativamente AV a distanza.

**Ridurre** il negativo di step 0.25D, purché non vi sia alcuna diminuzione di AV e nessun impatto visivo soggettivo

La visita medico oculistica è sempre raccomandata prima dell'applicazione delle lenti a contatto.  
Il valore della cicloplegia può essere il valore di riferimento per la valutazione della progressione miopica.  
Per una visione ottimale si suggerisce l'applicazione in refrazione con cil  $\leq 0,75$ D.

