

Guida alla scelta delle lenti multifocali Proclear 1 day

Pazienti diversi. Un semplice protocollo applicativo.

Scelta delle lenti semplificata, con un approccio unico.

- Geometria asferica centro vicino
- Progettate con un unico profilo di addizione
- Garantisce la visione da lontano e limita il compromesso visivo
- Massimizzare la visione da vicino nell'occhio non- dominante
 - Ottimizzazione della visione da vicino ed intermedia, mantenendo la binocularità
 - Per portatori con addizioni fino a +2.50D
- In generale, un'esperienza visiva più naturale

Guida alla scelta delle lenti

Fase 1 Aggiornare la refrazione e determinare l'occhio dominante.

Fase 2 **Occhio dominante:** Scegli la lente con il massimo potere per lontano.
Occhio non dominante: Scegli la lente ottimizzando il potere da lontano, come da tabella sottoriportata:

Addizione	Potere da vicino
fino a +1.00	Potere da vicino non necessario
da +1.25 a +1.75	+0.75 D
da +2.00 a +2.50	da +0.75 D a +1.00 D

Esempio di rifrazione: -2.00 OU con +1.75 ADD

Lente multifocale Proclear 1 day Rx


Occhio dominante	Occhio non dominante
-2.00	-1.25

Fase 3 Attendi almeno 15-20 minuti prima di valutare la visione. Se il cliente è soddisfatto, prescrivi le lenti.

Suggerimenti per raffinare il potere

Per migliorare la visione da lontano, effettuare una sovra refrazione con incrementi di +/- 0.25 D sull'occhio dominante in condizioni di visione binoculare. Molti professionisti hanno riscontrato che l'aggiunta di +0.25 D sull'occhio dominante nella Fase 2 ha migliorato la visione da lontano.

Per migliorare la visione da vicino, effettuare una sovra refrazione con incrementi di +/- 0.25 D sull'occhio non dominante in condizioni di visione binoculare.

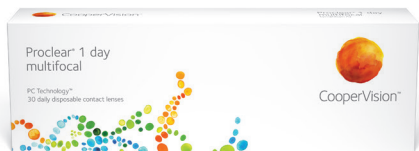

One innovative approach. More reasons to choose Proclear.

Migliora la visione da vicino senza disturbare la visione da lontano.

- Facile adattamento per i portatori di lenti a contatto nei vari step della presbiopia
 - Progettate con un unico profilo
 - Visione da lontano ottimale
- La geometria delle lenti contribuisce a semplificare l'applicazione delle lenti a contatto multifocali
 - Riduce il tempo sedia e minimizza il numero delle visite di controllo
- Ampio intervallo di parametri
- Un approccio nuovo per rispondere alle esigenze visive del portatore di lenti giornaliere

Tanti portatori. Una sola Proclear.

Un miglioramento significativo rispetto alla monovisione

- Garantisce la visione binoculare nelle alte addizioni, per offrire prestazioni visive superiori rispetto alla monovisione.
- Migliora la stereopsi, la visione intermedia e la visione notturna
- Lente con una reale geometria multifocale

Dati tecnici del prodotto

Lenti multifocali Proclear 1 day

Potere	da +6.00 a -10.00 (int. 0.25; int.i 0.50 dopo -6.00)
---------------	---

ADD	Progettate con un unico profilo
------------	--

Curva base	8,7 mm
------------	--------

Diametro	14,2 mm
----------	---------

